

Firmware-Update für CoaguChek® INRange

So halten Sie Ihr Messgerät auf dem neusten Stand

Das benötigen Sie für das Firmware-Update


- CoaguChek® INRange Messgerät
- USB Typ-A auf Micro-USB Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- Volle AAA-Batterien (Alkaline)
- Windows- oder Mac-Computer
- Die Firmware-Datei finden Sie hier:


<https://coaguchek.roche.com/global/en/article-listing/firmware-update.html>

Messgerät für Firmware-Update vorbereiten





Schritt 1.1

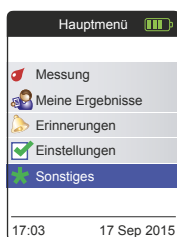- Batterien einlegen
- Schalten Sie Ihr CoaguChek® INRange Messgerät an, indem Sie die Ein/Aus-Taste  drücken





Schritt 1.2


- Wählen Sie *Hauptmenü*
- Drücken Sie die Pfeiltaste  um zu *Sonstiges* zu gelangen
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 



Schritt 1.3


- Drücken Sie die Pfeiltaste  um zu *Firmware-Update* zu kommen
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 

Messgerät an den Computer anschließen

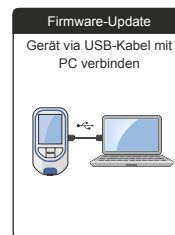

Schritt 2.1


- Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist und ein Benutzer angemeldet ist
- Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an das CoaguChek® INRange Messgerät an

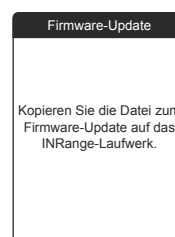

Schritt 2.2


- Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Computer
- Auf dem Display des Messgeräts wird „Kopieren Sie die Datei zum Firmware-Update auf das INRange-Laufwerk“ angezeigt

Kopieren Sie die Update-Datei auf das Messgerät

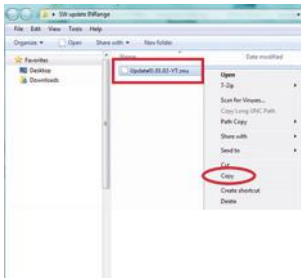


Schritt 3.1

- Laden Sie die Update-Datei auf Ihren Computer herunter (falls noch nicht geschehen)
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Aktualisierungsdatei zuerst entpacken
- Suchen Sie die Update-Datei im Windows Explorer oder im Finder (Mac)
- Wählen Sie die Update-Datei aus (z. B. Beispiel „Update01.04.12-YT.znu“)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Update-Datei „Update01.04.12-YT.znu“ und wählen Sie „Kopieren“

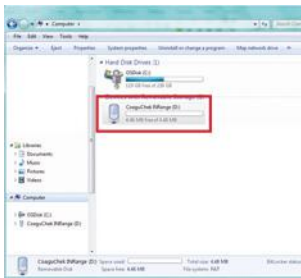


Schritt 3.2

- Suchen Sie Ihr CoaguChek® INRange Messgerät in Ihrem Windows Explorer oder Finder (Mac). Es wird als lokales Laufwerk angezeigt (analog einem USB-Stick)

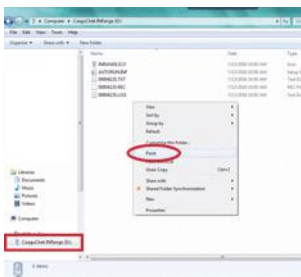

Schritt 3.3

- Wählen Sie Ihr CoaguChek® INRange Messgerät in Ihrem Windows Explorer oder Finder (Mac) aus
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den CoaguChek® INRange Ordner und wählen Sie „Einfügen“

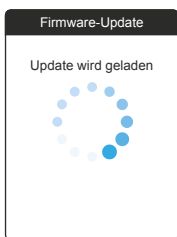

Schritt 3.4

- Der Update-Prozess beginnt



Schritt 3.5


- Das CoaguChek® INRange Messgerät führt das Update innerhalb weniger Minuten automatisch durch
- Die Anzeige ändert sich während des Update-Vorgangs automatisch

Überprüfen Sie die Firmware-Version




Schritt 4.1

- Warten Sie, bis sich das Messgerät nach dem Update-Vorgang automatisch ausschaltet
- Schalten Sie das Messgerät ein. Drücken Sie dafür die Ein/Aus-Taste

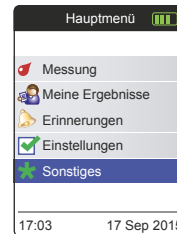

Schritt 4.2

- Wählen Sie *Hauptmenü*
- Drücken Sie die Pfeiltaste um zu *Sonstiges* zu gelangen
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste

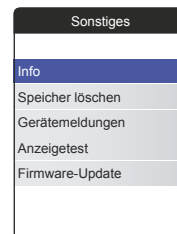

Schritt 4.3

- Wählen Sie *Info*, indem Sie mit der Eingabetaste bestätigen
- Prüfen Sie, ob die richtige Firmware-Version angezeigt wird, zum Beispiel „Update01.04.12-YT“



Sollte auf dem Display noch die alte Version der Firmware angezeigt werden, ist die Aktualisierung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie erneut das CoaguChek® INRange Messgerät zu aktualisieren, indem Sie die beschriebenen Schritte wiederholen. Sollte die Aktualisierung weiterhin fehlschlagen, wenden Sie sich bitte an Roche Diagnostics.

COAGUCHEK ist eine Marke von Roche.

©2021 Roche

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
www.coaguheck.com