

Information zum Code Chip zu Ihren Teststreifen

In jeder Teststreifenpackung befindet sich ein **Code Chip**. Dieser enthält chargenspezifische Informationen, wie zum Beispiel das Verfallsdatum. Achten Sie darauf, den Code-Chip zu verwenden, der mit den Teststreifen geliefert wurde. Zur Überprüfung können Sie die Zahlen auf dem Code Chip mit den Zahlen auf der Teststreifendose vergleichen.



Bitte seien Sie vorsichtig und werfen Sie den Code Chip nicht versehentlich mit der Umverpackung der Teststreifen weg. Entnehmen Sie der Verpackung die Teststreifendose UND den Code-Chip, der sich auch unter der Dose befinden kann. Schieben Sie den Code Chip in den hierfür vorgesehenen Schlitz an der Geräteseite.



Bei Fragen oder wenn Sie einen Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an das **Kunden-Service-Center unter 0800 0800 855**.

**Roche Diagnostics
Deutschland GmbH**

Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

CoaguChek
Kunden Service Center

Tel. 0800 0800 855
Fax +49 621 759 2081